



TRIPLOG

Bruksanvisning för

Triplog® AlcoTrue

Alkomätare





Introduktion

Tack för att du har köpt Triplog AlcoTrue® alkoholmätare från Opus Prodox AB. AlcoTrue® använder samma typ av mätteknik som polisen använder i sina alkomätare. Detta gör att du vet att du får ett riktigt mätresultat, som du kan lita på, vid ett utandningsprov. AlcoTrue® är lätt att använda och du får snabbt ett mätresultat. Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda AlcoTrue®.

Ansvar

Med AlcoTrue® kan du till exempel testa att du inte har alkohol i kroppen innan du sätter dig i bilen för att köra.

Kör aldrig bil alkoholpåverkad!

Tänk på att, om du är det minsta osäker på om du har alkohol i kroppen, kör inte bil!!


Resultatet från AlcoTrue® skall vara korrekt om AlcoTrue® har använts och kalibrerats på ett korrekt sätt av auktoriserad personal. Opus Prodox AB tar dock inget som helst juridiskt ansvar för att, om du trots att du har använt AlcoTrue® och fått ett resultat under den lagliga gränsen, skulle ha en promillehalt i blodet som är olaglig.

Innan du använder AlcoTrue®

AlcoTrue® levereras med 3 batterier och 3 munstycken. Öppna batteriluckan och sätt i batterierna som på bilden. Sätt därefter tillbaka batteriluckan

Munstycket till AlcoTrue® skall stoppas in i hålet längst upp på enheten som på bilden.

Använd endast de munstycken som levereras av Opus Prodox och dess återförsäljare. När du har gjort ett utandningsprov, byt alltid munstycke för att säkerställa korrekt resultat!

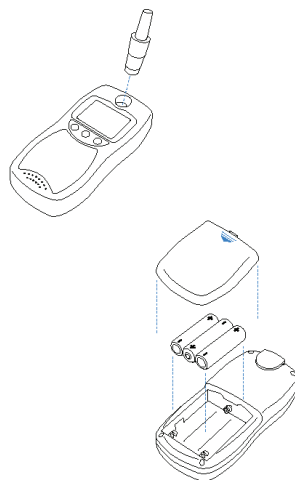



TRIPLOG

OBS! Om du behöver byta batterier, byt alltid alla 3 batterierna samtidigt för att säkerställa korrekt funktion.

Tänk på att...

- Vänta **minst 20 minuter** efter det att du har druckit alkohol innan du gör ett utandningsprov med AlcoTrue®. Detta för att säkerställa att du inte har någon alkohol i munnen och att all den alkohol som du har druckit har gått ut i blodet
- Om du röker, vänta **minst 3 minuter** efter det att du har rökt tills dess att du gör ett utandningsprov. Rök i utandningsluften kan ge ett felaktigt resultat och kan dessutom skada alkomätaren.
- **Om du använder AlcoTrue® och den visar att du har alkohol i kroppen men under gränsen för rattonykterhet, bör du ändå vänta med att köra bil tills AlcoTrue® visar att du ej längre har någon alkohol i kroppen.**
- AlcoTrue® skall kalibreras var 12:e månad för att säkerställa korrekt funktion. AlcoTrue® kommer att i god tid upplysa dig om när det är dags för kalibrering. Kalibrering skall ske av auktoriserad personal på av Safegruppen godkänt servicecenter
- För att få bästa resultat bör utandningsprov ske i rumstemperatur. AlcoTrue® skall helst förvaras i rumstemperatur minst 30 minuter innan utandningsprovet.
- Endast de munstycken som levereras av Opus Prodox och dess återförsäljare får användas

Användning



Utandningsprov

Sätt in ett munstycke i hålet på framsidan av AlcoTrue®.

Tryck på On/Off knappen (mittenknappen) tills dess att en ljudsignal hörs.

AlcoTrue® gör nu ett självtest och visar när det är dags för nästa kalibrering

När det står "Klar för test - Blås tills ljudsignalen upphör", tag ett djupt andetag och blås tills ljudsignalen upphör.



AlcoTrue® analyserar nu resultatet och efter några sekunder (beror på alkoholhalten) presenteras resultatet i form av Promillehalt. Resultatet lagras i minnet. De senaste 20 resultaten lagras. I Sverige är gränsen för rattonykterhet 0,20‰.

Genom att trycka på On/Off knappen och hålla ned den i 3 sekunder stängs AlcoTrue® av. AlcoTrue® stängs dessutom automatiskt av efter 2 minuter om du har lämnat den påslagen.

Visa resultat



Tryck på On/Off knappen tills dess att en ljudsignal hörs
När det står "Klar för test - Blås tills ljudsignalen upphör", tryck på On/Off knappen.

Du har nu kommit till Huvudmenyn
Tryck på piltangenten till "Resultat".
Tryck på OK.
Nu visas det senaste resultatet.

Du kan nu med piltangenterna se de senaste 20 resultaten
Tryck på On/Off knappen och du är tillbaka i huvudmenyn



TRIPLOG

Stänga av

Du kan alltid stänga av AlcoTrue® genom att hålla ned On/Off knappen i 3 sekunder.
På displayen visas nedräkning till dess att AlcoTrue® stängs av.

AlcoTrue® stängs dessutom automatiskt av efter 2 minuter om du har lämnat den påslagen.

Vill du ha mer information om alkomätare eller alkohol och bilkörning gå in på www.rattnykterhet.se.



Inställningar

Tryck på On/Off knappen tills dess att en ljudsignal hörs
När det står *"Klar för test - Blås tills ljudsignalen upphör"*, tryck på On/Off knappen.

Du har nu kommit till Huvudmenyn
Tryck på piltangenten till "Inställningar"
Tryck på OK.

Språk

Tryck på piltangenten till "Språk"
Tryck på OK
Tryck på piltangenten till önskat språk
Tryck på OK
Du har nu valt språk. Det går att välja svenska, engelska eller tyska.

Ljusstyrka

Tryck på piltangenten till "Ljusstyrka"
Tryck på OK
Tryck på piltangenterna till önskad ljusstyrka på displayen
Tryck på OK
Du har nu valt ljusstyrka



TRIPLOG

Tid

Tryck på piltangenten till "Tid"

Tryck på OK

Tryck på piltangenterna för att ställa in timme

Tryck på OK

Tryck på piltangenterna för att ställa in minut

Tryck på OK

Du har nu ställt tiden. Den visas uppe i högra hörnet på displayen.

Ljudsignal

Tryck på piltangenten till "Ljudsignal"

Tryck på OK

Tryck på piltangenterna för att välja på eller av

Tryck på OK

Du har nu ställt in ljudsignalen som bland annat används för att indikera hur länge du skall blåsa vid utandningsprovet.

OBS! Har du stängt av ljudsignalen, skall du blåsa tills ett klick hörs i AlcoTrue® när du gör ett utandningsprov.

Symboler på displayen

Batterisymbol

Längst upp till vänster på displayen visar en symbol hur mycket som finns kvar av batterikapaciteten.

4 gröna streck: 100%

3 gröna streck: 75%

2 gröna streck: 50%

1 gult streck: 25%

Röd symbol: <25% (dags att byta batteri)

OBS! Byt alltid alla 3 batterierna samtidigt för att säkerställa korrekt funktion.



Temperatursymbol

Symbolen anger om AlcoTrue® är för varm eller för kall att användas och visas endast då.

Röd temperatursymbol: Temperatur $>50\text{ }^{\circ}\text{C}$

AlcoTrue® måste kylas ned, helst till rumstemperatur innan användning. Den fungerar dock i temperaturer upp till $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Blå temperatursymbol: Temperatur $<-5\text{ }^{\circ}\text{C}$

AlcoTrue® måste värmas upp, helst till rumstemperatur innan användning. Den fungerar dock i temperaturer ned till $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Felmeddelanden

Felmeddelande	Åtgärd
Fel! Fel vid självtest Kontakta service!	Du måste då lämna in AlcoTrue® för reparation. Längst bak i bruksanvisningen står vart du skall vända dig.
Kontakta service för kalibrering	Du måste då lämna in AlcoTrue® för kalibrering. Längst bak i bruksanvisningen står vart du skall vända dig.
Kalibrering utgången	Du måste nu lämna in AlcoTrue® för kalibrering omgående. Längst bak i bruksanvisningen står vart du skall vända dig. AlcoTrue® fungerar fortfarande efter en fördröjning på 10 sekunder. Testresultaten är dock inte tillförlitliga!
Ej kalibrerad och/eller Felaktig temperatur	Resultat visas men ej tillförlitligt pga att enheten ej är kalibrerad eller att temperaturen är fel.
Felaktigt utandningsprov Försök igen	Gör om utandningsprovet. Du har inte blåst tillräckligt länge för att kunna få fram ett korrekt resultat.



TRIPLOG

Varning! Temperatur för hög Kylt ned alkomätaren	Du måste kyla ned AlcoTrue®, helst till rumstemperatur.
Varning! Temperatur för låg Värm upp alkomätaren	Du måste värma upp AlcoTrue® C, helst till rumstemperatur.
Låg batterinivå Alkomätaren stängs av OBS! Byt alla 3 batterierna samtidigt för att säkerställa korrekt funktion	Du måste byta batteri. AlcoTrue® stängs av automatiskt.

Kalibrering och service

AlcoTrue® måste kalibreras var 12:e månad för att säkerställa korrekta mätresultat. AlcoTrue® upplyser dig automatiskt om när det är dags för kalibrering.

Gå då in på www.triplog.se för mer information om kalibrering.

Skulle det bli något fel på din AlcoTrue® så kan du också kontakta Opus Prodox.

Tillbehör och reservdelar

Munstycken:

Förpackning med 25 st

Förpackning med 250 st

Bränslecell:

Bränslecellen, dvs den sensor som mäter alkoholhalten, måste normalt bytas var 24:e månad för att man skall vara säker på korrekta mätresultat. Vi byter bränslecellen vid behov i samband med kalibrering

Opus Prodox AB, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal

www.triplog.se